

EASY PULSE®

RCP mecánica compacta y eficiente gracias a las innovaciones tecnológicas


Última generación de RCP automática



SCHILLER
The Art of Diagnostics

EASY PULSE®

SCHILLER da un paso más en la mejora de la calidad de la RCP con el lanzamiento de este increíblemente pequeño y ligero dispositivo de compresión torácica mecánica: el EASY PULSE.

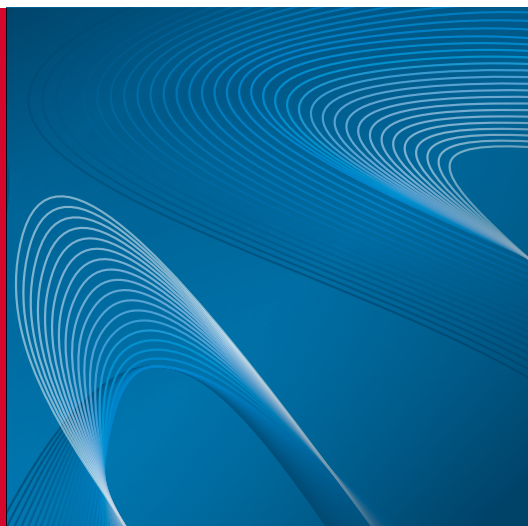

La aplicación de compresiones torácicas manuales de forma correcta durante un período prolongado resulta prácticamente imposible. No solo exige un gran esfuerzo físico, sino que también hay que llevar a cabo simultáneamente otras actuaciones, como monitorizar las constantes vitales.

EASY PULSE de SCHILLER es la solución para que la reanimación resulte más eficaz: este equipo portátil e independiente aplica compresiones torácicas de forma automática a un ritmo y profundidad regulares. Se acopla directamente a la parte superior del cuerpo del paciente, lo cual permite utilizarlo en cualquier situación, independientemente de las condiciones ambientales. Especialmente durante el transporte, garantiza una compresión torácica ininterrumpida de alta calidad.

El EASY PULSE es un equipo tan sencillo que puede utilizarlo una sola persona. Su tamaño y su peso no tienen parangón: el EASY PULSE pesa menos de 3,5 kg, lo cual ofrece posibilidades completamente nuevas, p. ej., para los servicios de rescate por aire.

ÚLTIMA GENERACIÓN DE DISPOSITIVOS DE RCP AUTOMÁTICA

El EASY PULSE cuenta con una exclusiva combinación de banda y pistón que permite una compresión en 3D para conseguir la máxima eficiencia.

El peso del dispositivo no descansa en un único punto sino que se distribuye uniformemente por toda la base, por lo que no influye en las compresiones torácicas ni en el retroceso.



CORREDERA

El dispositivo deslizante permite preparar correctamente al paciente para las compresiones torácicas mecánicas. También lleva muy poco tiempo acoplar el equipo gracias al práctico sistema de correa: menos de 15 segundos con personal que ha recibido formación.



CARGADOR

El EASY PULSE se alimenta con una batería recargable (tiempo de funcionamiento aproximado de 45 minutos). La batería se puede cargar en un cargador doble (menos de 2 horas) o en modo turbo (menos de 50 minutos).



FACILIDAD DE USO

En una emergencia, todos los movimientos tienen que ser correctos. El uso del sistema EASY PULSE es muy fácil e intuitivo: basta con pulsar dos botones para iniciar la reanimación inmediatamente.



FUENTE DE ALIMENTACIÓN EXTERNA Y CABLE DE CONEXIÓN DIRECTA

Se suministra una unidad de alimentación con un voltaje de entrada de 100 VCA a 240 VCA. El EASY PULSE se puede utilizar directamente con una fuente de alimentación de 12 VCC - 24 VCC mediante un cable de conexión especial.

INNOVACIONES TECNOLÓGICAS

Ligero

- ❖ Dispositivo de RCP increíblemente pequeño y ligero: 3,5 kg
- ❖ Ideal para espacios limitados

Completo

- ❖ Compresiones torácicas multidireccionales (3D)
- ❖ Compresiones torácicas de gran calidad con un ritmo y una profundidad regulares, lo cual no se puede conseguir con las compresiones manuales
- ❖ Posibilidad de ciclo 30:2 de masaje cardíaco-ventilación

Sencillo

- ❖ Gracias al sistema de cierre con dispositivo deslizante, se puede ajustar fácilmente al tórax del paciente
- ❖ Fácil de colocar, fácil de utilizar

Características complementarias

- ❖ Batería intercambiable con indicador de nivel de carga
- ❖ Funcionamiento autónomo durante 45 minutos (con una batería)
- ❖ Conexiones: entrada de CC externa, USB



Americas
SCHILLER Americas Inc.
Doral, Florida 33172

North America:
Phone +1 786 845 06 20
Fax +1 786 845 06 02
sales@schilleramerica.com
www.schilleramerica.com

Latin America & Caribbean
Phone +1 305 591 11 21
Fax +1 786 845 06 02
sales@schillerla.ch
www.schillerla.ch



Asia
SCHILLER Asia-Pacific / Malaysia
52200 Kuala Lumpur, Malaysia
Phone +603 6272 3033
Fax +603 6272 2030
sales@schiller.com.my
www.schiller-asia.com



Austria
SCHILLER Handelsgesellschaft m.b.H.
A-4040 Linz
Phone +43 732 70 99
Fax +43 732 757 000
sales@schiller.at
www.schiller.at



China
Alfred Schiller (Beijing) Medical Equipment
Co., Ltd.
100015 Beijing, China
Phone +86 010 52007020
Fax +86 010 52007020-8016
info@schillerchina.com
www.schillermedical.cn



Croatia
Schiller medicinski instrumenti d.o.o.
10000 Zagreb
Phone +385 1 309 66 59
Fax +385 1 309 66 60
info@schillerzg.hr
www.schiller.hr



France
SCHILLER Médical S.A.S.
F-67162 Wissembourg
Phone +33 3 88 63 36 00
Fax +33 3 88 63 36 49
info@schiller.fr
www.schiller-medical.com



France (distribution France)
SCHILLER France S.A.S.
F-77608 Bussy St Georges
Phone +33 1 64 66 50 00
Fax +33 1 64 66 50 10
contact@schillerfrance.fr
www.schiller-france.com



Germany
SCHILLER Medizintechnik GmbH
D-85622 Feldkirchen b. München
Phone +49 89 62 99 81 0
Fax +49 89 609 50 90
info@schillermed.de
www.schillermed.de



Hungary
SCHILLER Diamed Ltd.
H-1141 Budapest
Phone +36 1 383 4780 / +36 1 460 9491
Fax +36 1 383 4778
info@schillerhungary.hu
www.schillerhungary.hu



India
SCHILLER Healthcare India Pvt. Ltd.
Mumbai - 400 059, India
Phone +91 22 6152 3333 / 2920 9141
Fax +91 22 2920 9142
sales@schillerindia.com
www.schillerindia.com



Poland
SCHILLER Poland Sp. z o.o.
PL-02-729 Warszawa
Phone +48 22 843 20 89 / +48 22 647 35 90
Fax +48 22 843 20 89
schiller@schiller.pl
www.schiller.pl



Russia & C.I.S.
AO SCHILLER.RU
125124 Moscow, Russia
Phone +7 (495) 970 11 33
Fax +7 (495) 956 29 10
mail@schiller.ru
www.schiller.ru
www.schiller-cis.com



Serbia
SCHILLER d.o.o.
11010 Beograd
Phone +381 11 39 79 508
Fax +381 11 39 79 518
info@schiller.rs
www.schiller.rs



Slovenia
SCHILLER d.o.o.
2310 Slovenska Bistrica
Phone +386 2 843 00 56
Fax +386 2 843 00 57
info@schiller.si
www.schiller.si



Spain
SCHILLER ESPAÑA, S.A.
ES-28232 Las Rozas/Madrid
Phone +34 91 713 01 76
Fax +34 91 355 79 33
schiller@schiller.es
www.schiller.es



Switzerland
SCHILLER-Reomed AG
CH-8953 Dietikon
Phone +41 44 744 30 00
Fax +41 44 740 37 10
sales@schiller-reomed.ch
www.schiller-reomed.ch



Turkey
SCHILLER TÜRKİYE
Okmeydanı-Sisli - Istanbul
Phone +90 212 210 8681 (pbx)
Fax +90 212 210 8684
info@schiller.com.tr
www.schiller-turkiye.com



United Kingdom
SCHILLER UK
Bellshill, ML4 3PR
Phone +44 1698 744 505
Fax +44 1698 744 474
sales@schilleruk.com
www.schilleruk.com

